

## ● Limpando a Bomba

A bomba deve ser limpa regularmente, da seguinte maneira:

1. Desconecte a bomba do cabo de alimentação de energia e desligue-a antes de limpar, para evitar qualquer risco de choque elétrico.
2. Usando uma esponja ou pano úmido, limpe a bomba com água morna.
3. A bomba é resistente à água e pode ser colocada sob água corrente para a limpeza.
4. Seque cuidadosamente com um pano macio antes de utilizá-la novamente.

### ⚠ Atenção!

- Não mergulhe a bomba na água.
- Não coloque na lava-louças.
- Para evitar choque elétrico, nunca limpe enquanto a bomba estiver ligada ou conectada à eletricidade.
- Não esterilize em autoclave.
- O uso de limpadores/desinfetantes agressivos e álcool pode danificar o gabinete da bomba.

## ● Garantia e Reparos

**Intervalo de Manutenção:** a cada 5 anos.

Para manutenção, buscar assistência técnica autorizada Nestlé.

## ● Alarmes - Como Utilizar?

Sempre garanta o monitoramento adequado, oportuno e regular dos pacientes, especialmente se houver interrupção da infusão nutricional pela sonda, que poderá causar riscos ao paciente. Quando um alarme soar:

| Etapa | Botão | Instrução   |
|-------|-------|---|
| 1     |       | Pressione a tecla  para confirmar o alarme.                                       |
| 2     |       | Resolva cada alarme de acordo com as instruções específicas, constante do manual. |
| 3     |       | Pressione a tecla  para reiniciar a infusão da nutrição.                          |

Informações de contato:

NestléHealthScience  
**Compat ella®**

## ● Alarmes - Mensagens e Soluções

| Mensagem | Solução  |
|----------|--|
|          | Finalize a administração ou programe uma nova terapia nutricional. Limpe o VOLUME DADO NESTE PERÍODO (terapia) para iniciar uma nova terapia nutricional. O volume alvo reprogramado deve ser maior do que o VOLUME DADO NESTA TERAPIA. Nota: Se o valor não for limpo antes de cada nova terapia nutricional, o alarme de fim da terapia soará antes da hora.   |
|          | Continue a administração ou desligue a bomba. Estenda o tempo limite de inatividade por mais 2 minutos, pressionando .   |
|          | Feche a tampa da bomba. Se danificada, entre em contato com seu representante local da Nestlé Health Science ou com uma assistência técnica autorizada pela Nestlé.  |
|          | Abra a tampa e confirme se a instalação do cassete e do tubo da sonda está correta. Consulte a página 2 e a Seção 6,4 do manual do usuário.  |
|          | Se a terapia nutricional tiver terminado, finalize a infusão, desligue a bomba e lave o tubo da sonda. Se não tiver terminado: substitua ou encha novamente o frasco da dieta, carregue o conjunto de administração e reinicie; ou confira se há oclusão. Certifique-se de que o conjunto de administração não esteja conectado ao paciente durante o carregamento da dieta.   |
|          | Verifique se há algum estrangulamento ou bloqueio no tubo do conjunto de administração. Se necessário, reposicione para garantir que a nutrição possa fluir. Abra a tampa, verifique a instalação do conjunto de administração e feche a tampa. Reinicie a nutrição. Verifique se há algum estrangulamento ou bloqueio no tubo do conjunto de administração. Verifique se o tubo da sonda está desobstruído e sem estrangulamentos. Esguiche o tubo da sonda, se necessário. |
|          | Abra a tampa, verifique a instalação do conjunto de administração e feche a tampa novamente. Reinicie a nutrição.  |
|          | Conecte a bomba à tomada por meio do adaptador de alimentação de cabo de energia. Carregue a bateria. Confirme o recebimento da mensagem PRONTA PARA USO pressionando .  |
|          | Remova a fonte de interferência magnética ou mova a bomba para um local diferente.   |
|          | Desligue a bomba e reinicie-a para limpar o erro. Se o erro retornar ou se repetir, não utilize a bomba. Entre em contato com seu representante local da Nestlé Health Science ou com uma assistência técnica autorizada pela Nestlé.  |

NestléHealthScience  
**Compat ella®**  
Guia rápido



Conheça Compat Ella®


## ● Guia Rápido

- Este guia rápido não substitui a versão original.
- As instruções devem ser lidas antes da utilização do equipamento.
- Qualquer dúvida verifique o manual ou questione um representante Nestlé Health Science.

**Compat ella**  
Training Centre

## ● Preparando a Bomba e o Equipo

1. Abra a tampa/porta, erguendo a lingueta com o polegar.
2. Enrole o laço do cassete em torno do rotor. Observe a seta que mostra a orientação correta.
3. Usando o polegar, deslize o cassete para a direita para prender o cassete na bomba.
4. Feche a tampa/porta, pressionando o símbolo "PUSH" (EMPURRE).

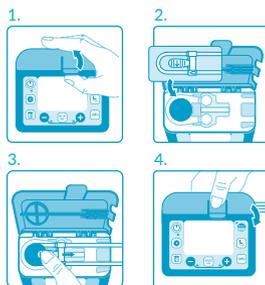

⚠ **Atenção:** usar apenas os equipos Compat Ella®.

## ● Visão Geral das Telas Coloridas



Informações de programação: caracteres em **preto**



Condições normais de operação: ícones **verdes** com caracteres em **preto**



Alarmes: caracteres e ícones em **vermelho**



Informação: caracteres em **azul**



Configurações: caracteres em **verde**

## ● Função dos Botões

| Botão | Função   |
|-------|--|
|       | Ligar ou desligar a bomba. Pressione por 2 segundos.   |
|       | Iniciar/Pausar a bomba ou para adiar o alarme.   |
|       | Carregamento automático da dieta. Pressione por 2 segundos.  |
|       | Percorrer a programação de taxa de infusão, volume e intervalo.  |
|       | Diminuir e aumentar os valores (manter pressionado: acelera a velocidade). Pressione os dois botões juntos para bloquear e desbloquear o teclado.              |
|       | Pressione para redefinir todos os valores do programa com os valores padrão e limpar o histórico de administrações recentes. Pressione o botão por 3 segundos. |
|       | Pressione repetidamente para percorrer o histórico de administrações recentes. Pressione e segure para acessar o Histórico de Volume dos últimos 30 dias.      |
|       | Pressione repetidamente para percorrer as configurações da bomba.  |

⚠ **Atenção:** Certifique-se de que o conjunto de administração não esteja conectado ao paciente durante o carregamento da dieta.

## ● Nutrição em Modo Contínuo

| Passo | Botão | Função  |
|-------|-------|---|
| 1     |       | Ligar a bomba   |
| 2     |       | Revisar <i>VOLUME DADO NESTE PERÍODO</i>                    |
| 3     |       | Limpar <i>VOLUME DADO NESTE PERÍODO</i>                     |
| 4     |       | Carregar a fórmula de nutrição no conjunto de administração |
| 5     |       | Usar  e  para <i>DEFINIR VELOCIDADE FLUXO 1-600 mL/h</i>    |
| 6     |       | Usar  e  para <i>DEFINIR VOLUME 1-4.000 mL / CONT*</i>      |
| 7     |       | Iniciar a terapia nutricional                               |

\*Contínuo: nenhum volume de nutrição foi definido. A bomba funcionará continuamente até que a fórmula termine.

⚠ **Atenção:**

- Ao programar uma nova terapia, certifique-se de limpar o parâmetro *VOLUME DADO NESTE PERÍODO*.
- Após iniciar uma terapia, verifique todos os parâmetros da terapia (inclusive taxa de infusão, dose e volume administrado neste período).

## ● Nutrição em Modo Intermitente

Consulte o manual de uso para obter mais informações.

*Ela vai te ajudar a tornar a Terapia Nutricional mais fácil.*

Conheça Compat Ella®

\* Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.  
NHSMD00073 Rev10 09SEP2015